

NÁVOD K POUŽITÍ

TELESKOPICKÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA

MR 107, 107 T



POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší schodišťové nebo jiné výškové bariéry a usnadňují tak např. naložení mechanického a elektrického vozíku nebo skútru do auta.

POPIS

Lehká a skladná rozšířená teleskopická dvoudílná (107) nebo třídílná (107 T) duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem, zkosenými konci a díky madlu, umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci. Rampy je možné volitelně doplnit obalem MR 107 BAG.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nepřekračujte maximální nosnost ramp 250 kg.

ROZLOŽENÍ A INSTALACE RAMPY:

Pro rozložení rampy odklopte tahem aretační pojistku a vysuňte zvolený díl do zvolené délky (možná průběžná aretace) a pojistku tlakem zaklapněte. Při skládání postupujte opačně.

Rozložené rampy umístěte zkosenou částí nahoru a ujistěte se, že jsou položeny stabilně.



ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržívat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.