



Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33
40067 Rastignano – BO
Italy
<http://www.opo.it>



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
Český republika
www.dmapraha.cz



100 kg
MAX.

**Max. váha
uživatele: 100 kg**

Rev. 09 - 05/2021

NÁVOD K POUŽITÍ

TŘÍBODOVÉ HOLE

REF 0700 L, 0705 L

Předpokládané použití

Čtyřbodové hole jsou **Zdravotnické prostředky třídy I**, které slouží jako pomůcka pro osoby s problémy s chůzí, které potřebují podpůrnou hůl, která jim zajistí větší stabilitu než běžná hůl.

Způsob použití hole se liší od uživatele k uživateli. Vyžaduje však minimální zaškolení uživatele kvalifikovaným personálem.

Kontraindikace a obecná upozornění



Používání hole se nedoporučuje osobám trpícím závažným psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi (např. Parkinsonova choroba). V těchto případech musí vyhodnocení vhodné pomůcky provést zdravotnický personál během nácviku chůze.


Některým osobám může dlouhodobé používání pomůcky způsobit problémy s klouby paže. Pokud cítíte bolest v ruce, zápěstí, lokti nebo rameni, doporučujeme přestat používat pomůcku a poradit se s lékařem.

Nepoužívejte v přímém kontaktu s poraněnou tkání.

NIKDY nepoužívejte poškozenou pomůcku.


Záruka: 2 roky od data nákupu (doloženo) s výjimkou dílů podléhajících opotřebení a/nebo neoprávněným zásahům.

Obr. 1

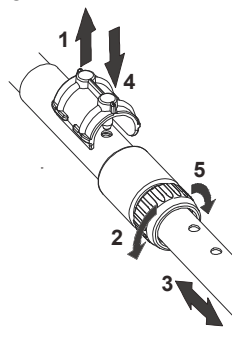


Obr. 2

Odstraňte zajišťovací sponu zatlačením oběma palci po stranách.
NEPOUŽÍVEJTE NÁSTROJE!

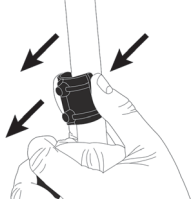

Obr. 3

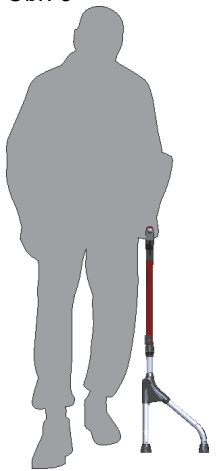

NASTAVENÍ VÝŠKY

Výška nastavení je uvedena na štítku.

Postupujte podle kroků na obr. 1:

1. Uvolněte zajišťovací sponu (viz obr. 2).
2. Odjistěte stahovací matici.
3. Nastavte výšku posunutím trubek a jejich uvedením do souladu s otvory.
4. Znovu umístěte zajišťovací sponu zpět.
5. Stahovací matici utáhněte šroubováním.

Poznámka

K odstranění zajišťovací spony nepoužívejte žádné nástroje, z důvodu poškození.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Směr použití hole je naznačen na obrázku 3.

Pro zajištění stability musí uživatel hole chodit krátkými kroky, **aby hůl spočívala na všech čtyřech opěrných nohách.**

Varování

- Pozor na mokré, kluzké nebo nakloněné povrchy.
- Věnujte pozornost použití hole na schodech a ujistěte se, že jsou všechny nohy bezpečně umístěny na schodech.
- Pomůcka pro chůzi není vhodná pro použití na měkkém nebo nerovném povrchu.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Pomůcka pro chůzi lze znovu použít po kontrole strukturální integrity, absence vad na rukojeti a výměně protiskluzových nástavců.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výměna protiskluzových nástavců: Nástavce se při chůzi dotýkají země a tím podléhají opotřebením. Pro bezpečnější použití je pravidelně vyměňujte za nové originální nástavce.

Dezinfekce: K dezinfekci rukojeti používejte dezinfekční prostředky s nízkou koncentrací chlornanu sodného

Čištění: Pravidelně čistěte rukojeť neutrálním mýdlem.