

Návod k použití pro držák berlí a holí Toolflex Zboží 146P, 1461P, 1478P, 1481, 1479, 1482



Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití, dodržujte pokyny v něm uvedené a uschovejte si jej pro pozdější použití.

Účel

Držák berlí a holí Toolflex se používá k jednoduché a bezpečné fixaci pomůcek pro chůzi a pomáhá tak lidem se sníženou pohyblivostí v každodenním životě. Seznamte se rovněž pečlivě s bezpečnostními pokyny, které obsahují další podrobnosti!

1. Obecné informace o výrobku

Držáky Toolflex se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- Elastická pryž EPDM na držáku drží berle bezpečně.
- Jednoduché použití bez velkého úsilí.
- Vysoce odolný a odolný proti vibracím.
- Montážní lišta (č. 146) nebo samostatný držák Č. zboží 1461) pro připevnění ke zdi.

2. Bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím vždy zkontrolujte pevné upevnění držáků.
- Při každém použití vždy zkontrolujte pevné uchycení berle v držáku!




3. Montáž a manipulace

Montáž

Číslo zboží 146 - Držák Toolflex na zeď

Upevnění montážní lišty s několika držáky na zeď:


- Nejprve odstraňte černé krytky na koncích montážní kolejnice a v případě potřeby sejměte držáky z montážní lišty (**Obr. 1 + Obr. 2**)
- Najděte vhodné místo na zdi. Umístěte montážní lištu do požadované polohy na zeď a označte otvory.
- Vyvrtejte otvory ve vyznačených bodech. Nejprve se ujistěte, že v místě vrtání nejsou žádná přírodní potrubí nebo elektrické vedení !
- Připevněte lištu na zeď. K tomu použijte vhodné kotvy a šrouby, které jsou vhodné pro danou zeď.
- Vložte znovu držáky na montážní lištu (**Obr.2**).
- Nasaďte zpět krytky na konce montážní lišty.

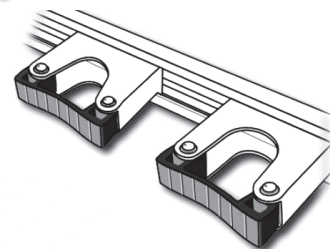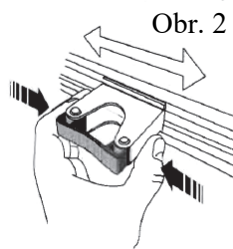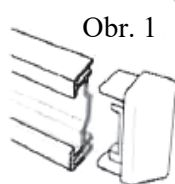

Číslo zboží 1461 - Držák Toolflex pro samostatnou montáž


Upevnění samostatného držáku na zeď nebo na jinou rovinnou plochu:

- Nejprve vyjměte zajišťovací šroub z držáku a vytáhněte držák směrem dopředu (**viz obrázek**).
- Najděte vhodné místo na zdi. Vložte držák berlí a holí na požadované místo na zdi a označte otvory.
- Vyvrtejte otvory ve vyznačených bodech. Nejprve se ujistěte, že v místě vrtání nejsou žádná přírodní potrubí nebo elektrické vedení!
- Připevněte držák na zeď. K tomu použijte vhodné kotvy a šrouby, které jsou vhodné pro danou zeď.
- Otočte držák znovu zpět do normální polohy a nasaďte zajišťovací šroub zpět do otvoru.

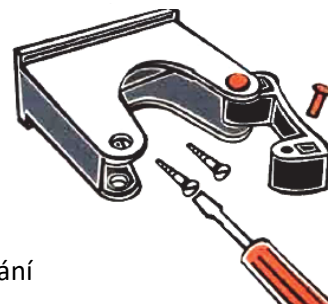

Zacházení:

Berle můžete jednoduchým pohybem zasunout a vložit do držáku a znovu je pak z držáku vyjmout bez velkého vynaloženého úsilí.

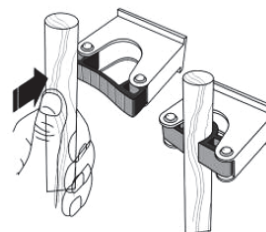

4. Čištění a péče

Čištění a dezinfekci lze provádět pomocí komerčně dostupných produktů.

5. Údržba

Držáky Toolflex jsou bezúdržbové.

6. Likvidace

S dotazy ohledně místní likvidace odpadů se obračejte na svého specializovaného prodejce.

7. Záruka a odpovědnost

Zakoupili jste si vysoce kvalitní produkt. Pokud chcete uplatnit oprávněnou reklamaci, navzdory standardům vysoké kvality naší výroby, jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení během 12 měsíční záruční doby vadný výrobek buď opravit nebo vyměnit za bezvadný kus.

Neneseme odpovědnost za škody vyplývající ze změn provedených na našich výrobcích.

Záruka se nikdy nevztahuje na škody související s běžným opotřebením nebo nevhodným používáním.

Díly podléhající opotřebením jsou ze záruky vyloučeny.

8. Technické údaje

Výrobek: Držák Toolflexu			
Zboží	146P	1461P	1478P
Popis	Držák na zeď	Držák pro samostatnou montáž	Držák pro samostatnou montáž
Trubka-Ø	od 20 mm do cca 30 mm	od 20 mm do ca. 30 mm	od 30 mm do ca. 40 mm
Ostatní	včetně montážní lišty	-	-
Montážní lišta pro držák Toolflex (bez držáku)			
Zboží	1481	1479	1482
Délka	20 cm	50 cm	90 cm
Ostatní	včetně upevnění		



Ossenberg GmbH
Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

From us you will receive only products in accordance with the guidelines of the Medicine Devices Act.

We are certified according to DIN EN ISO 13485.



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQI 0115318

